

# HANDLEIDING

PEDICURE MOTOR VIVALDI LINE PODO



Veel succes met uw  
nieuw aangekochte  
pedicure motor.

## VOORZORGSMAATREGELEN

- Pak de onderdelen met uiterste zorg uit. Alle onderdelen van de pedicure motor zouden perdirect geïnspecteerd moeten worden, zodat enige mogelijke schade die ontstaan is tijdens het transport vastgesteld kan worden. In het geval van schade, verwittig de fabrikant/leverancier binnen 48u na levering met indicaties van de beschadigde onderdelen.
- Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing alvorens te starten, onderhoud uit te voeren en/of andere acties uit te voeren met dit apparaat.
- Voor optimaal gebruik, inspecteer van tijd tot tijd de onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage.
- Knoei niet met de interne elektrische systemen van de machine.
- Het apparaat is uitgerust met beveiligingsmechanisme(s) die niet verwijderd en/of aangepast mogen worden.
- Laat onbevoegde personen geen reparaties en/of onderhoud uitvoeren op de machine.
- Gebruik geen benzine, oplosmiddelen of andere brandbare middelen om de onderdelen proper te maken.
- Gebruik alleen spray vloeistof van Anubis Care.

## BESCHRIJVING, INSTALLATIE EN GEBRUIK

- 1) Steek het handstuk in de drager (met de bovenkant naar boven gericht) en zet de machine op een vlakke en stabiele ondergrond met genoeg ruimte rondom.
- 2) Verbind de stroomkabel met de machine en een stopcontact
- 3) Verbind de voetpedaal (optie) (of optionele multifunctionele voetpedaal) met de machine
- 4) Draai de stop van het vloeistofreservoir en vul deze met Anubis Care spray vloeistof. Draai nadien de stop weer op het vloeistofreservoir !! Alvorens het vloeistofreservoir te vullen, kijk na of het apparaat uit staat !!!! Indien er vloeistof wordt gemorst op het apparaat, droog dan de machine grondig af voor hem aan te zetten !!
- 5) Steek een **droge** frees in het handstuk. De frees zal automatisch vastgezet worden wanneer de motor geactiveerd wordt. **Test ook regelmatig of uw frezen nog recht zijn met een frezentester.**
- 6) Zet het apparaat aan via de aan-/uitknop  
!! Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel !!  
!! Kijk op voorhand na dat het voltage klopt met de voltage aangegeven op de sticker op de onderkant van de machine !!

# PROCEDURE VULLEN SLANG

- 1) Leg het handstuk met frees in een opvangschaal of enig ander voorwerp dat geschikt is om een mogelijke kleine waterlekkege op te vangen.
- 2) Zet de spray regelaar volledig naar links.
- 3) Duw de knop op het controlepaneel, onder 'light', in voor 3 seconden op het scherm zal u 'FILL' zien (afkorting voor 'filling') en de vulprocedure zal starten.
- 4) Laat de knop los en wacht tot het einde van de vulprocedure (dit kan ongeveer 30 seconden in beslag nemen). Wanneer u 'END' ziet op het scherm, dan is de vulprocedure afgerond en is het apparaat klaar voor gebruik **!! De vulprocedure MOET uitgevoerd worden tijdens de eerste installatie, na het compleet legen van het vloeistofreservoir en in geval van een spraystoring !!** Herhaal zo nodig de "FILLING" procedure meerdere keren tot er druppels water uit het voorstuk van uw handstuk komen. Tijdens de "FILLING" procedure het handstuk lager dan uw toestel houden, zo komt de druk sneller op gang. Een alternatief voor de digitale "FILLING" procedure is 5x op de rubber knop aan de zijkant te drukken - zet daarna uw toestel aan - spray kraan 60 seconden volledig open en aan. De lucht zal uit uw systeem geraken.
- 5) Draai de 'motor'-knop om de rotatiesnelheid en rotatierichting te kiezen. Draai de 'spray'-knop om het sprayniveau te kiezen **!! Als de voetpedaal niet verbonden is aan het apparaat, dan zal de motor onmiddellijk beginnen met draaien !!**  
**!! Gebruik een passende snelheid bij de diameter en type van de gebruikte frees !!**
- 6) Druk op de 'light'-knop om de LED-modus van het handstuk te activeren. Het kleine blauwe ledlampje zal aan/uit gaan volgens de gekozen optie.
  - Eerste optie: Led aan
  - Tweede optie: Led gaat automatisch aan wanneer de motor geactiveerd wordt.
  - Derde optie: Led uit
- 7) Duw de voetpedaal in om de motor te activeren.

## GEBRUIK VAN DE MULTIFUNCTIONELE VOETPEDAAL

- Duw de pedaal in om de motorsnelheid aan te passen a.d.h.v. de uitgeoefende druk opde pedaal.
- Duw de rechtse knop in om de LED-modus van het handstuk te activeren.
  - Eerste optie: Led aan
  - Tweede optie: Led gaat automatisch aan wanneer de motor geactiveerd wordt
  - Derde optie: Led uit  
(Zelfde functie als de 'light'-knop op het controlepaneel)
- Duw de linkse knop in om de spray-modus te activeren. De twee mogelijke opties zijn:
  - Lucht (Er zal een puntje verschijnen rechtsonder op het scherm)
  - Verneveld water

## ONDERHOUD

### **!! Zet het apparaat altijd uit voor elke onderhoudsprocedure !!**

- Uitkuisen/vervangen van de filter:

In geval van een spraystoring, is de eerste stap altijd het uitvoeren van de vulprocedure (door de knop onder 'light' voor 3 seconden in te duwen)

Als het probleem nog steeds aanwezig is, kan je de staat van de filter in het vloeistofreservoir nakijken en, indien nodig, de filter uitkuisen/vervangen.

Om de filter uit het vloeistofreservoir te halen, moet u de tube in het vloeistofreservoir omhoog trekken om de filter uit de tube te trekken.

De filter kan hierna uitgekuist worden met perslucht, water of met ontkalkingsmiddelen. (Nadien altijd afspoelen met water alvorens de filter opnieuw in de tube te steken)

- Proper maken apparaat en handstuk:

Maak de externe oppervlakken proper met een zacht doekje dat natgemaakt is met isopropanol. Zorg ervoor dat er geen water/detergent in het apparaat raakt. Na het proper maken, afdrogen met een zachte doek.



Bij technische storingen en voor uw jaarlijks onderhoud,  
neem contact op met de technische dienst  
van Anubis Care (+323 647 36 12)

Anubis Care bvba  
Donksesteenweg 212  
B-2930 Brasschaat

[www.anubiscare.be](http://www.anubiscare.be)

[info@anubiscare.be](mailto:info@anubiscare.be)