



HANDLEIDING

Vivaldi Line 006

Dit apparaat wordt in België volgens CE-voorschriften van de Europese Unie gebouwd. Het CE-label met de voorgeschreven technische en elektrische gegevens vindt u op de rugzijde van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door vooraleer u dit toestel in gebruik neemt. In twijfelgevallen neemt u best contact op met uw leverancier.

1. Algemene informatie

1.1 Voorwoord We wensen u veel geluk met de aankoop van dit VIVALDI LINE 006 apparaat. De VIVALDI LINE 006 is een modern, zeker en makkelijk te bedienen toestel. Er werd bij de ontwikkeling van dit apparaat rekening gehouden met de recentste eisen van voetverzorging, in het bijzonder aangaande betrouwbaarheid, precisie, veiligheid en duurzaamheid. Gezien de hoogstaande kwaliteit van VIVALDI LINE motoren geven we 10 jaar garantie op de motoren en 1 jaar op het handstuk. Om te kunnen genieten van de premie vrije waarborg dient de complete unit jaarlijks voor een onderhoudsbeurt binnen gebracht te worden of na 250u gebruik. Ter voorkoming van misverstanden zijn de ANUBIS LINE motoren voorzien van een verzegelde urenteller.

1.2 Bijzondere functies van de VIVALDI LINE 006 is een combinatie van een sterke freesmotor met traploos instelbaar toergetal en een regelbare verstuivingsfunctie. Tezamen zorgen deze voor een desinfecterende en verkoelende voet-(hand)verzorging. De freesmotor kan met of zonder spray gebruikt worden. Het spraysysteem werkt alleen met ingeschakelde freesmotor. De verbindingkabel van het handstuk is, om veiligheidsredenen, vast aan het handstuk verbonden. Bij levering wordt de freeskop beschermd door een metaalstaafje. Bewaar dit bij de verpakking om bij een transport van het toestel terug te plaatsen voor bescherming. Aan het frontpaneel zijn voor de bediening de knoppen en regelaars geplaatst. Als toebehoren is een voetschakelaar (Aan/Uit) beschikbaar. Hiervoor is een aansluiting voorzien aan de achterzijde van het toestel. Met de meegeleverde elektriciteitskabel verbindt u de VIVALDI LINE 006 met een stopcontact.

1.3 Voor en veilig gebruik: Telkenmale u het toestel wil gebruiken moet u volgende veiligheidsregels en voorbereidingen in acht nemen:

- Houd het toestel weg van kinderen en niet-aangewezen personen.
- Een goede luchtcirculatie is noodzakelijk om de spray-aerosol af te voeren en om te verhinderen dat het toestel oververhit geraakt. Bedek nooit de verluchtingsopeningen.
- De verstuivingen kunnen ontvlambaar zijn. Roken, ook door uw klanten, is ongewenst. De combinatie van de verstuivingsgassen en sigarettenrook is trouwens giftig. Plaats daarom ook geen levensmiddelen in de buurt.
- Plaats uw VIVALDI LINE 006 niet in de buurt van warmtebronnen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt onmiddellijk na extreme temperatuurwisselingen (bv. na een koude nacht in de auto). Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt bij kamertemperatuur.
- Uw VIVALDI LINE 006 is niet geschikt voor gebruik (en opslag) in vochtige ruimtes zoals een badkamer.
- Gebruik voor een veilige opslag en vervoer een draagkoffer of een sterke schoudertas.
- Sluit het apparaat aan met de bijgeleverde netsnoer in een geaard stopcontact of stekkerdoos. Voor het eerste gebruik, controleert u of de plaatselijke netspanning overeenkomt met de gegevens op het CE-label.

- Bedien nooit de aan/uit-schakelaar indien het freeshandstuk niet is aangesloten. Zorg ervoor dat deze goed is aangesloten.
- Wanneer een vloeistof in uw apparaat belandt, schakel het toestel dan onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Breng het toestel naar uw leverancier voor onderhoud. Lees hiervoor ook de garantievoorschriften aan het einde van deze handleiding.
- Wanneer het controlelampje van de aan/uit-schakelaar niet brandt, controleer dan of de stekker is aangesloten. Wanneer het toestel dan nog niet aangeschakeld wordt neemt u best contact op met de verkoper van het toestel. Open onder geen enkele omstandigheid zelf het toestel.
- Werk steeds met handschoenen, veiligheidsbril, mondkapje en veiligheidskledij (katoen).
- Wanneer het piepsignaal en/of het waarschuwingslampje signaal geven, dient u het toestel aan te bieden voor onderhoud.



1.4 Voorbereidingen alvorens te gebruiken: Om het waterreservoir te vullen neemt u deze uit het vak van het toestel. Schroef het draaisluitstuk van het reservoir en vul deze uitsluitend met desinfecterende sproeivloeistof tot aan de hals van het reservoir. Dit betekent een gebruiksinhoud van 160ml. Gebruik uitsluitend ANUBIS spray-vloeistof. Deze is desinfecterend en werkt zowel koelend als kalmerend voor de klant. Gebruik geen leidingwater omdat door kalkaanslag het handstuk mogelijk beschadigd kan worden. Ook huishoudreinigingsmiddelen kunnen het motorbinnenwerk beschadigen. Voeg bij de sproeivloeistof geen essences toe. Deze kunnen de verstuvingsgaatjes verstoppen. De verdeler of fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van "valse" sproeivloeistoffen. TIP: Hou de vulstand in het oog. Wanneer de vloeistof-container droog valt of wanneer deze lange tijd niet wordt gebruikt, kan het een minuut duren vooraleer de verstuiver werkt. Dit is nogal storend voor zowel uw klant als voor u. Gebruik geen freesjes 2526mm.

1.5 Gebruiksinstructies: Wanneer u alle bovenstaande voorbereidingen en alle veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen hebt uitgevoerd, kan het toestel ingeschakeld worden. Handel voor ingebruikname op volgende wijze:

- Zet de "aan/uit-schakelaar aan om het toestel aan te zetten. Het indicatielampje licht op. Of de spray indicator oplicht hangt af van hoe het apparaat het laatst werd geschakeld. Vooraleer u de freemotor aanzet, kan u de instellingen naar uw wensen wijzigen.
- Neem het handstuk vast in de hand. Druk, indien uitgeschakeld en indien gewenst, aansluitend op de spray-knop.
- De eerste toevoer van sproeivloeistof hangt af van de positie van de overeenkomstige regelaar. Draai deze regelknop tegen de klok in om de toevoer te verhogen. Draai met de klok mee om de toevoer te verlagen.
- In beide draairichtingen kan u met de draairegelaar traploos het toerental van de freemotor in stellen met een maximum draaigetal van 40.000 toeren per minuut. De laagste stand is uitermate geschikt voor de verzorging van vingernagels.
- De looprichting (links/rechts) van de freemotor kunt u instellen met de looprichting-aanwijzer knop. Om van looprichting te veranderen is het belangrijk dat u de motor uitzet.
- **OPMERKING:** Om van frees te wisselen altijd eerst de motor uit zetten en wacht tot de motor stilstaat. Vervolgens kan u het freesje losmaken door de freeskop los te draaien. Gebruik geen druk met de frees tijdens de behandeling.

1.6 Onderbreken en beëindigen van de behandeling: De verstuivingsbediening is eenvoudig te onderbreken of te stoppen door op de overeenkomstige toets te duwen. Wanneer u de freeshandeling wenst te onderbreken hoeft u alleen de frees aan/uit-schakelaar op uit te plaatsen waardoor automatisch ook de eventuele ingeschakelde spray beëindigd wordt. Uw VIVALDI LINE 006 blijft bedrijfsklaar. Bij het terug aanzetten van de frees aan/uit-schakelaar kan u de behandeling onmiddellijk hervatten met dezelfde instellingen als eerst ingesteld. Als de behandeling volledig is beëindigd drukt u op de aan/uit-schakelaar. Zowel de motor als de verstuiving zullen dan stoppen en de LED-lampjes gaan uit. Zoals hierboven vermeld onthoudt uw VIVALDI LINE 006 alle instellingen.

2.1 Onderhoud van de pedicure motor:

2. Onderhoud en technische gegevens

- Trek het netsnoer uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen.
- Steek het toestel en handstuk niet in water of chemicaliën.
- Gebruik voor het schoonmaken van het toestel en handstuk geen stalen borstel of ultrasone reiniger.
- Gebruik voor een eenvoudige reiniging een conventionele allesreiniger.
- Desinfecteer het handstuk met een papierdoek of een zachte katoenen doek, bevochtigd met 70% Isopropanol. Zorg er voor dat geen vocht in de behuizing komt.
- Wanneer u ANUBIS sprayvloeistof gebruikt voor uw verstuiving dan hoeft u het sprayvloeistofreservoir en de slangen niet te reinigen na behandeling.
- Gebruik een ultrasone reiniger of heteluchtsterilisator voor het desinfecteren van frezen en andere gereedschappen.

2.2 Onderhoud van de micro-motor en handstuk

- De micro-motor is onderhoudsvrij
- Het af te nemen kopstuk dient bij voorkeur dagelijks, op het einde van iedere werkdag, gereinigd en gesmeerd te worden.
- Dit kan op een eenvoudige wijze geschieden door plaatsing van het aluminium koppelstuk op de ANUBIS LINE flacon (Afb. D1, D2, D3).
- De geplaatste frees of het metalen pinnetje moet worden verwijderd (Afb. D4) en het aluminium koppelstuk dient met het zwart rubber ringetje MAXIMAAL tot in het handstuk worden geschoven om een goede sluiting te bekomen (Afb. D5, D6). Blaas met de ANUBIS LINE flacon gedurende enkele seconden door het handstuk. TIP: Reinig ook de sproeiers van het handstuk.
- Check de staat van uw frees met Anubis haar frezentester (MM-201). Het is noodzakelijk om met regelmaat de staat van de te gebruiken frees te controleren. Het is namelijk essentieel dat uw frees perfect recht is. De frezentester van Anubis Care is daarom een noodzakelijk hulpmiddel. Schuif de te controleren frees in de frezentester en u kunt onmiddellijk zien of uw frees nog perfect recht is. Let Op! Het gebruik van een kromme frees zal de mechaniek van het handstuk beschadigen en laat uw garantie doen vervallen.



2.3 Waarschuwing Het is aangeraden om uw VIVALDILINE 006 jaarlijks, of na 250u werking, na te laten kijken. De verdeler van uw toestel kan u een erkend onderhoudspunt adviseer

3.4 Technische specificaties en garantie

Standaard 230 Volt (Optie 110 Volt)

| | |
|--------------------------------|--|
| Afmetingen (B x D x H) | 325 x 170 x 155 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Netspanning | 220-240 V AC |
| Stroomverbruik (maximal) | 75 Watt |
| Stroomverbruik (standby) | 5 Watt |
| Netsnoerzekering | 8 AT 250W |
| Toeren per minuut | 40.000 |
| Schutzklasse | 2 |
| Classificering | BF |
| IP Classificering | IP20 |
| Toegestane bedrijfstemperatuur | 5 - 40 - C |
| Toegestane opslagtemperatuur | 5 - 40 - C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20-65% |
| Apparaat positie | Altijd opgericht horizontaal |
| Meegeleverde delen | Netsnoer, handstuk met miCO-motor |

3. Verklaring

De ontwerpafdeling van Anubis Care in België, is voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën en kennis. Kleine verschillen tussen de tekst in deze handleiding en in het ontwerp zijn steeds mogelijk. Het CE-label op de achterkant van het toestel bevat de volgende (technische) gegevens:

- Voeding: spanning (V)
- Stroomverbruik: Watt
- Frequentie (Hertz - Hz)
- Stroomsterkte van de printzekering (Ampère - AT)
- Model van het apparaat
- Dit CE-label is de garantie dat dit apparaat werd ontwikkeld en gebouwd in overeenstemming met recente EU-richtlijnen. Verwijder dit label niet. Deze gegevens zijn belangrijk voor de 10-jarige garantie en bevatten informatie wanneer uw leverancier om raad vraagt. De garantie begint vanaf de dag van levering, waarvan de factuur/rekeningafschrift als bewijs geldt. Bewaar dus deze factuur/rekeningafschrift goed. De garantie en aansprakelijkheid met betrekking tot zowel de motor als het handstuk vervalt bij misbruik of oneigenlijk gebruik, onbevoegde wijzigingen en aanpassingen, reparatie door een niet-geautoriseerde service, of door schade door val of ruw gebruik. Dit geldt ook voor de aansprakelijkheid voor materiële en persoonlijke schade. Wanneer het toestel wordt teruggestuurd, moet dit gebeuren in de originele verpakking.

EC DECLARATION OF COMPLIANCE, CE

Manufacturer Anubis Care bvba

Address: Donksesteenweg 212, 2930 Brasschaat (Antwerp), België

Tel: +32 (0)36473612

Fax: +32 (0)3 645 1575

E-mail: info@anubiscare.be

VAT number: BE0809628631

Directive 89/392/EEC-91/S86/EEC-93/44/EEC satisfy the conditions set out in the Low Voltage

Guideline Directive. 75/23/EEC-93/63/EEC satisfy the conditions set out in the Guideline Electromagnetic Compatibility

Guideline Directive 89/336/EEC-92/31/EEC-93/68/EEC

Place: Brasschaat, Date: 25- 07- 2010.

Jan de Bruijn.